



Fastjekt® / Fastjekt® Junior Verschreibung CHECKLISTE



Stand der Aktualisierung: 26.04.2017 · Version 1.0

Name / Vorname

Geburtsdatum

Datum

Fastjekt® Junior: ab 7,5 bis 25 kg Körpergewicht (mit grünem Etikett)

Fastjekt®: ab 25 kg Körpergewicht (mit gelbem Etikett)

1

Haben Sie den Patienten als Risikopatienten oder als Patienten diagnostiziert, der bereits eine anaphylaktische Reaktion erlitten hat?

JA

2

Weiß der Patient / die Patientin, wann Adrenalin verabreicht werden muss?

JA, und er/sie hat den Fastjekt®/Fastjekt® Junior bereits benutzt

▶ Weiter ab **SCHRITT 3**

JA, aber er/sie hat den Fastjekt®/Fastjekt® Junior noch nicht benutzt

▶ Weiter ab **SCHRITT 2**

NEIN

▶ Weiter ab **SCHRITT 1**

SCHRITT 1: Haben Sie den Patienten / die Patientin darüber aufgeklärt, wie er / sie sich nach Kontakt mit einem Allergen zu verhalten hat und wann Adrenalin verabreicht werden muss?

JA

SCHRITT 2: Haben Sie den Fastjekt®/Fastjekt® Junior vorgeführt und mit dem Fastjekt®/Fastjekt® Junior Trainingsgerät sowie anhand des Videos „Wie der Fastjekt®/Fastjekt® Junior zu verwenden ist“ die einzelnen Schritte für die Applikation genau erklärt? (Weitere Informationen siehe Rückseite)

JA

SCHRITT 3: Haben Sie den Patienten / die Patientin aufgefordert, mit dem Fastjekt®/Fastjekt® Junior Trainingsgerät vorzuführen, wie der Fastjekt®/Fastjekt® Junior zu handhaben ist?

JA

SCHRITT 4: Erfolgte der Hinweis, dass das Trainingsgerät getrennt vom Autoinjektor mit Wirkstoff aufbewahrt werden muss?

JA

SCHRITT 5: Haben Sie dem Patienten ein Trainingsgerät ausgehändigt?

JA

3

Haben Sie ihm empfohlen, dieses Selbsttraining regelmäßig zu wiederholen und alle Menschen in seinem unmittelbaren Umfeld in dieses Training einzubeziehen?

JA

4

Haben Sie ihm empfohlen, stets 2 Fastjekt® / Fastjekt® Junior mit sich zu führen, für den Fall, dass keine Besserung von Symptomen eintritt und eine zweite Adrenalinosis erforderlich ist?

JA

5

Haben Sie dem Patienten die Nutzung einer Erinnerungsfunktion empfohlen, um sich rechtzeitig vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums des Fastjekt®/Fastjekt® Junior ein neues Rezept verordnen zu lassen?

JA

6

Weiß der Patient, dass er weitere Informations- und Bestellmöglichkeiten unter www.mein-fastjekt.de hat?

JA



Die ANWENDUNG des Fastjekt® / Fastjekt® Junior

Holen Sie den **Fastjekt® / Fastjekt® Junior** aus der Transporthülle. Nehmen Sie eine liegende Position mit leicht hochgelagerten Beinen ein, um die Durchblutung zu stabilisieren, bzw. eine sitzende Position, wenn Sie Schwierigkeiten beim Atmen haben.

1.



Halten Sie den **Fastjekt® / Fastjekt® Junior** in Ihrer dominanten Hand, legen Sie den Daumen direkt unterhalb der blauen Kappe auf und bilden Sie eine Faust um den **Fastjekt®/Fastjekt® Junior**. Ziehen Sie danach die blaue Sicherungskappe ab.


Achten sie darauf: „Blau zum Himmel, orange zum Oberschenkel.“

2.




Halten Sie den **Fastjekt® / Fastjekt® Junior** in einem Abstand von ca. 10 cm von der Außenseite des Oberschenkels entfernt. Das orange Ende muss zur Außenseite des Oberschenkels zeigen.

3.

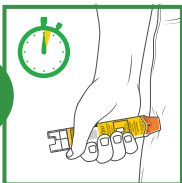

Stoßen Sie den **Fastjekt® / Fastjekt® Junior** im rechten Winkel (90°) kräftig in die Außenseite des Oberschenkels. Halten Sie ihn 3 Sekunden fest gegen den Oberschenkel gepresst.

4.

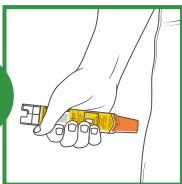

Dann den **Fastjekt® / Fastjekt® Junior** entfernen und sicher entsorgen. Der orange Nadelschutz verdeckt nun die Nadel.

5.



Wählen Sie 112, verlangen Sie einen Notarzt und geben Sie als Grund eine schwere allergische Reaktion „Anaphylaxie“ an.

Der Fastjekt® / Fastjekt® Junior kann jeweils nur einmal verwendet werden. Wenn keine Besserung der Symptome eintritt, können Sie nach 5–15 Minuten einen zweiten Fastjekt® / Fastjekt® Junior anwenden.

Die AUFBEWAHRUNG des Fastjekt® / Fastjekt® Junior

- Lagern Sie den **Fastjekt® / Fastjekt® Junior** nicht bei Temperaturen über 25 °C. Nicht im Kühlschrank aufbewahren und nicht einfrieren.
- Bewahren Sie das Behältnis zum Schutz vor Lichteinwirkung in der Originalverpackung auf. Unter Luft- oder Lichteinfluss zersetzt sich Adrenalin schnell und die Lösung verfärbt sich rosa oder braun.
- Bitte daran denken, den Inhalt der Glaszylinderampulle im **Fastjekt® / Fastjekt® Junior** Autoinjektor von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um sicherzugehen, dass die Flüssigkeit noch klar und farblos ist.
- Ersetzen Sie den **Fastjekt® / Fastjekt® Junior** Autoinjektor zum Ablaufdatum durch einen neuen bzw. zu einem früheren Zeitpunkt, falls die Lösung verfärbt ist oder feste Partikel sichtbar sind.